

Phonak TVLink II


Quick setup guide / Schnellstartanleitung

Guide d'installation rapide / Stručný návod na použitie




PHONAK
life is on

Components
Komponenten
Composants
Komponenty

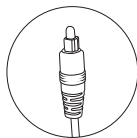



Optický kábel

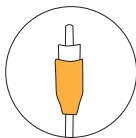

Koaxiálny kábel



ComPilot II

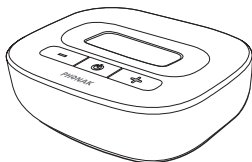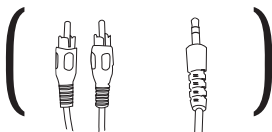


Phonak TVLink II
základňa

Connect power and audio cable


Netzteil und Audio-Kabel anschliessen

Connectez le câble d'alimentation et le câble audio

Zapojte sieťový a audio kábel

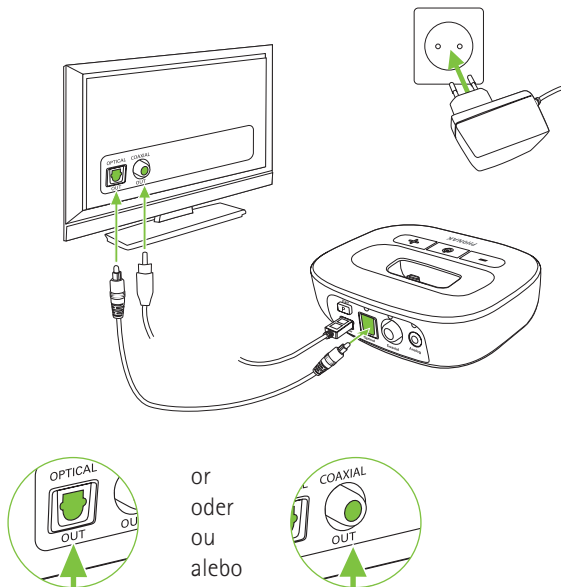

Charge 1 hour
1 Stunde laden
Chargez 1 heure
Nabijte zariadenie (1 hodina)



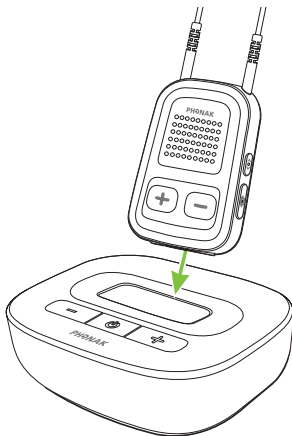


Wearing ComPilot II

ComPilot II tragen

Portez ComPilot II

Nosenie zariadenia ComPilot II

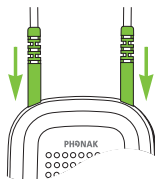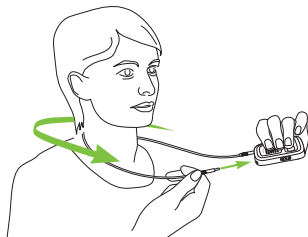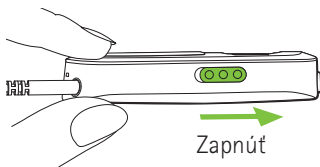


Switch on TVLink II



TVLink II einschalten

Mettez TVLink II en marche

Zapnete zariadenie TVLink II

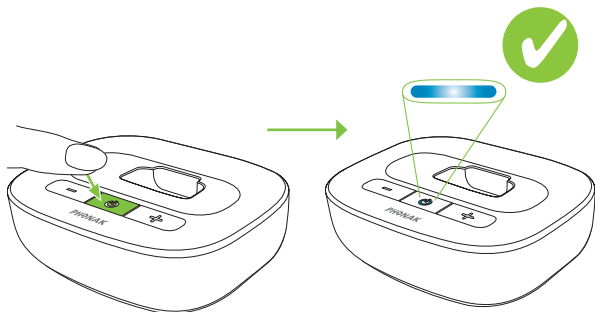

Usage
Benützung
Utilisation
Používanie

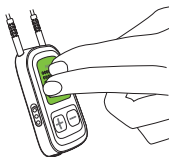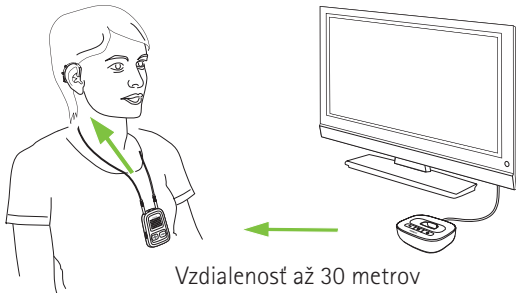

Pause / Resume
Pause / Abspielen
Pause / Diffuser
Prerušit / Pokračovať



Volume setting
Lautstärke einstellen
Réglage de volume
Nastavenie hlasitosti



The Phonak TVLink II user guide will give you detailed information about the installation.

Die Phonak TVLink II Gebrauchsanweisung informiert detailliert über die Installation.

Le mode d'emploi Phonak TVLink II vous donne des informations détaillées sur l'installation.

Podrobné informácie k používaniu zariadenia Phonak TVLink II nájdete v príslušnej užívateľskej príručke.



ON
Ein
Marche
Zapnuté



No audio signal
Kein Audiosignal
Pas de signal audio
Bez zvukového signálu



Audio transmission
Tonübertragung
Transmission audio
Prenos zvuku



Pause
Pause
Pause
Prerušenie prenosu



Pairing
Koppeln
Couplage
Párovanie

Servis a záruka

Na výrobok je poskytovaná záručná doba v súlade s platným občianskym zákonníkom SR, ktorá vstupuje v platnosť v deň nákupu.

Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo starostlivosťou, vystavením chemikáliám, ponorením do vody alebo nadmerným namáhaním. Poškodenie spôsobené okolnosťami ako napr. pádom na zem, vypraním, rozšliapnutím, rozhryznutím od zvieraťa, vysúšaním v mikrovlnnej rúre a pod. nie je predmetom poskytnutej záruky. Záruka stráca platnosť pri škodách spôsobených tretími stranami alebo neautorizovaným servisom. Táto záruka sa nevzťahuje na servisné zásahy prevedené poskytovateľom zariadenia na jeho prevádzke.

Záručný list musí byť riadne a čitateľne vyplnený vrátane dátumu zakúpenia, podpisu a pečiatky predajcu.

Táto záruka sa vzťahuje na zariadenie značky Phonak, ktoré je uvedené nižšie.

Sériové číslo zariadenia: _____

Dátum zakúpenia: _____

Pečiatka a podpis predajcu: _____

Distribútor

Artsonic s. r. o.

Sídlo:

Radlinského 27

811 07 Bratislava

IČO: 52 800 008, IČ DPH: SK2121165783

zapísaná v obchodnom registri vedeného u Okresného súdu v Bratislave 1, oddiel: SRO, vložka č. 142695/B

Centrálny servis:

Akustik plus s. r. o.

Krížna 5

811 07 Bratislava

tel.: SK 02 554 24 272

e-mail: akustik@akustik.sk, servis.phonak@akustik.sk

Facebook: [@PhonakSlovensko](#)

You Tube: [Phonak CZ/SK](#)

Kontaktné a servisné formuláre: www.akustik.sk

Doplňky pre načúvacie prístroje:

batérie, čistiace prostriedky, diaľkové ovládanie, príslušenstvo pre počúvanie televízie, telefonovanie, bezdrôtová komunikácia a iné www.audiodom.sk

© Kopírovanie časti a/alebo celej tejto príručky je možné len so súhlasom spoločnosti Artsonic s. r. o.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Phonak AG so sídlom Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Švajčiarsko týmto na svoju vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že:

- výrobok Phonak TV Link II je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach,
- zdravotnícky prostriedok ComPilot II je v súlade so smernicou 93/42/EHS o zdravotníckych prostriedkoch a smernicou 2014/53/EU o rádiových zariadeniach.

Poznámky

Autorizovaný predajca:

Distibútor pre Slovenskú republiku:

Artsonic s. r. o.

so sídlom Radlinského 27,

811 07 Bratislava

www.artsonic.sk

www.phonak.sk



Výrobca:

Phonak AG

Laubisrütistrasse 28

CH-3280 Stäfa

Švajčiarsko

www.phonak.com

029-0319-Slovak/V1.00/2021-07/A+W/SB © Sonova AG All rights reserved

