

## Popis zariadenia e100.DS

Elektrická vysúšačka Cedis e100.DS je určená pre dôkladné vysušenie načúvacích prístrojov akejkoľvek značky. Nie je určená pre nabíjacie načúvacie prístroje.

## Účinnosť

- Dostatok priestoru pre vysušenie a skladovanie, napr. pre načúvacie prístroje s ušnými koncovkami, slúchadlá do uší atď.
- V priestrannej hygienickej komore je vzduch rovnomerne ohrievaný pomocou elektrického ovládania ohrevu a miniatúrny ventilátor zaisťuje prúdenie vzduchu do komory.
- Komora sa zahrieva na teplotu 45°C +-5°C, preto je kvôli bezpečnosti vo vnútri umiestnený senzor na sledovanie teploty.
- Ideálnu cirkuláciu vzduchu zaisťuje separačná jednotka v spodnej časti komory.
- Načúvacie prístroje sú šetrne a spoľahlivo zbavené vlhkosti a potu.

## Funkcie

Dotykový prepínač režimov/zapnutie/vypnutie.

- 1,5 hodinový režim pre bežnú akumuláciu vlhkosti.
- 3 hodinový intenzívny režim pre silnú akumuláciu vlhkosti.
- Trvalá, viacstupňová kontrola teploty.
- Bezpečnostné vypnutie v prípade poruchy s vizuálnym zobrazením chyby.
- Automatické vypnutie po procese vysušania.

## Ďalšie vybavenie

Veko s intuitívnou drážkou pre otváranie a s praktickým magnetickým uzáverom. Kozmetické zrkadlo ako pomôcka pre vybratie/vloženie výrobku.

## Charakteristika výkonu

Napájacia jednotka:  
Vstup AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz;  
Výstup DC 5 V, 1 000 mA

Rozmery:  
Vonkajšie rozmery:  
W 95 x D 83,5 x H 35 mm;  
Vnútorne rozmery komory:  
W 77 x D 55 x H 19 mm

Hmotnosť: 120 g

## Likvidácia odpadu



Symbol prekríženého smetného koša Vás má upozorniť, že zariadenie sa nesmie vyhadzovať ako bežný domový odpad. Staré alebo nepoužívané zariadenie zlikvidujte na miestach určených na likvidáciu elektronického odpadu alebo zariadenie odovzdajte na likvidáciu svojmu poskytovateľovi zariadenia. Správna likvidácia chráni životné prostredie a zdravie.

## ⚠ Dôležité informácie

Pre európske krajiny:


- Zariadenie môže byť používané deťmi od 8 rokov a staršími osobami. Osoby so zníženou fyzickou a kognitívnou schopnosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať zariadenie len pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo po obdržaní pokynov k bezpečnému používaniu zariadenia a porozumenia súvisiacich rizík.
- Zariadenie nepatrí do rúk deťom. Čistenie a údržba nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru.

Pre ostatné krajiny:

- Zariadenie nie je určené k používaniu osôb (vrátane detí) so sníženými kognitívnymi schopnosťami alebo nedostatkom znalostí a skúseností s používaním, pokiaľ neprebieha pod dozorom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosah detí, aby sa s ním nehrali.
- UV žiarenie môže poškodiť kryt načúvacích prístrojov. Zariadenie je určené len pre UV-odolné posluchové systémy/koncovky a načúvacie prístroje.
- Ak dôjde k akékoľvek závade alebo poruche na zariadení, vypnite ho a vráťte poskytovateľovi.
- Nezasahujte do zariadenia a používajte len dodaný napájací adaptér.
- Zariadenie obsahuje dva UV žiariče typu 3 (UV-C). Nepozerajte sa do zdrojov UV žiarenia.
- Počas údržby a servisu by mala byť vysúšačka úplne vypnutá zo zásuvky.


# Návod na použitie

1

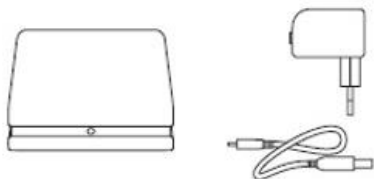

Balenie obsahuje vysúšačku Cedis e100.DS, napájací adaptér a pripojovací kábel.

2

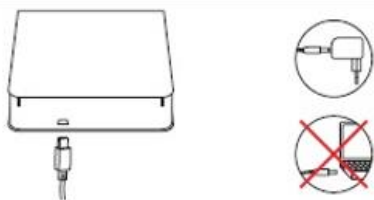


Zapojte pripojovací kábel do vstupu USB umiestneného na boku zariadenia. Pripojovací kábel spojte s napájacím adaptérom.

3



Načúvací prístroj a ušnú koncovku poutierajte suchou papierovou vreckovkou, prípadne použite čistiaci roztok alebo vlhčené dezinfekčné utierky určené na ošetrovanie ušných koncoviek a načúvacích prístrojov.

4

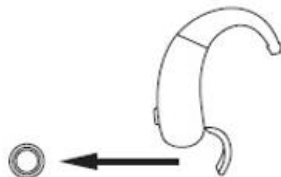

Vyberte batériu z načúvacieho prístroja. Nikdy nekladajte do vysúšačky načúvací prístroj s batériou. Na vysušanie nabíjateľných načúvacích prístrojov používajte vysúšačku Cedis e150.DUS.

5



Na bežné každodenné vysušanie používajte krátky program, na intenzívne vysušanie, v prípade silného prevlhnutia, používajte dlhý program.

6




Stlačením dotykového tlačidla 1x sa rozsvieti červené svetlo pre nastavenie krátkeho programu. Zavretím veka zariadenia sa program automaticky spustí.

7




Stlačením dotykového tlačidla 2x sa rozsvieti modré svetlo pre nastavenie dlhého programu. Zavretím veka zariadenia sa program automaticky spustí.

8

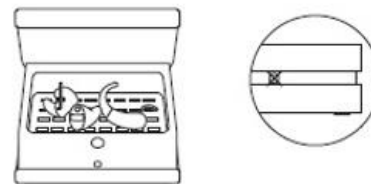

Po skončení programu kontrolné svetlo na vysúšačke zhasne.

9

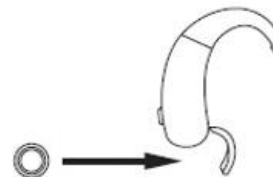

Vložte do načúvacieho prístroja batériu.

10



V prípade akékoľvek komplikácie zariadenie signalizuje chybu blikaním svetiel modrá/červená. Vysúšačku vypnite vytiahnutím napájacieho adaptéra zo zásuvky a nechajte ju vypnutú cca 30 minút. Následne zariadenie zapojte do zásuvky a spustíte požadovaný program. Ak sa chybové hlásenie nezruší a pretrváva nefunkčnosť zariadenia, kontaktujte poskytovateľa.