

Tento návod na obsluhu odkazuje na „Elektrickú hygienickú stanicu SUDAC30“ na UV-C čistenie a sušenie načúvacích systémov/ušných koncoviek a slúchadiel do uší.

Návod na obsluhu

1. Rozsah dodávky jednotky.
2. Zapojte USB kábel do zásuvky, ktorý sa nachádza na bočnej strane vášho sušiča zariadenia. Pripojte ho k napájacímu zdroju alebo k počítaču. Spotrebič je teraz pripravený na použitie.
3. Na čistenie načúvacích prístrojov/ušných foriem alebo slúchadiel do uší použite vlhku čistiacu handričku.
4. Vyberte batériu z načúvacieho prístroja (ak je to možné).
5. Otvorte kryt zariadenia a vložte načúvací prístroj/slúchadlo alebo slúchadlá do uší do sušiča komory.



Zapnite pomocou dotykového senzora.

LED sa rozsvieti.

Proces čistenia začne po zatvorení veka.

6. Spustí sa cyklus UV-C čistenia (8 minút).
7. Potom sa spustí cyklus sušenia (142 minút).
8. Cyklus UV-C čistenia/sušenia je ukončený po zhasnutí LED kontrolky.
9. Znova vložte batériu do načúvacieho prístroja. Pred použitím nechajte načúvacie prístroje/slúchadlá alebo slúchadlá do uší niekoľko minút vychladnúť.
10. Ak sa počas UV-C čistenia/sušenia dotknete sensorového tlačidla na viac ako 3 sekundy, môžete jednotku predčasne vypnúť.

Výkonové charakteristiky

Popis: Elektrická hygienická stanica

Model/referenčný typ: SUDAC30

Klasifikácia:

- Triedall
- Vstupná jednotka: 5,0 V ~ ; 3,5 W
- Prevádzkové prostredie: 10°C až 37°C (50°F až 98,6°F); pri relatívnej vlhkosti maximálne 80%
- Sušenie: pri 40°C ± 3°C (104°F ± 37,4°F)
- Nastavenie časovača: UV-C čistenie cca. 8 min.; sušenie cca. 142 min.
- Rozmer jednotky: 115x86x38mm

Upozornenie!

- Jednotka má 3 zdroje (UV-C) svetla.
- Nepozerajte sa priamo do zdroja UV svetla.
- Jednotka je určená len na domáce použitie v interiéri.

⚠ Dôležitá informácia

- Deti vo veku 8 rokov a staršie; osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a neskúsené osoby môžu tento spotrebič používať, ak budú pod dohľadom alebo budú poučené a pochopia funkcie, ako spotrebič bezpečne používať a s tým spojené riziká.
- Deti nesmú používať spotrebič ako hračku.
- Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- UV žiarenie môže zmeniť farbu puzdra načúvacieho prístroja.
- Jednotka je vhodná len pre načúvacie prístroje/tvarovky do uší odolné voči UV žiareniu a slúchadlá do uší.


- Ak sa na tomto zariadení vyskytne akákoľvek porucha, odpojte ho a ihneď ho odnesť predajcovi.
- Jednotku nerozoberajte.
- Jednotka má 3 zdroje (UV-C) svetla. Nepozerajte sa priamo do zdroja UV svetla.
- Pred čistením a údržbou musí byť spotrebič úplne odpojený od elektrickej siete.

Poznámka k likvidácii



Symbol na výrobku znamená, že tento spotrebič nemôžete likvidovať v bežnom domovom odpade. Namiesto toho ho musíte zlikvidovať v príslušných komunálnych systémoch spätného odberu starých elektrických a elektronických zariadení.

Ak chcete získať ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto produktu, obráťte sa na miestny úrad, ktorý sa zaoberá odpadom vo vašom meste, likvidačnú službu alebo na svojho predajcu.

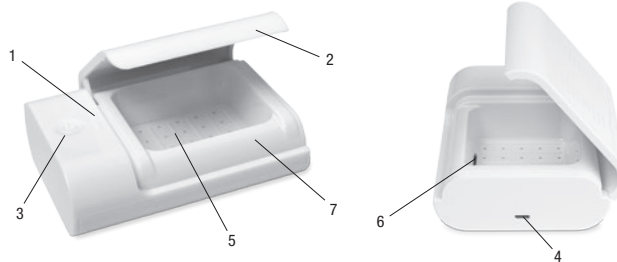

Popis produktu

- 1 LED displej
- 2 Veko jednotky
- 3 Dotykový senzor
- 4 DC pripojenie pre USB-C
- 5 Hygienická komora na UV-C čistenie a sušenie
- 6 Zdroj svetla UV-C

